

Transport et expédition de l'ORTHOSCOOT® NH1

Transport en voiture ou en train



Pour réduire le NH1 à la plus petite taille possible pour le transport, mettez tant la genouillère que le guidon dans leur position minimale respective (voir pages 89 et 90).



Pliez l'unité de guidon vers l'arrière.
(Pour ouvrir la fermeture rapide, voir à la page 88)



Selon les besoins, vous pouvez enlever les roues avant au moyen des boutons rouges de dégagement rapide. Soulever pour cela, la roue avant respective, comme affiché dans l'image, avec une seule main.



Appuyez avec votre main libre sur le bouton rouge en caoutchouc jusqu'à la butée pour déverrouiller la roue. Dans le même temps, poussez avec le pouce de l'autre main la roue axialement vers l'extérieur pour libérer le verrou de façon permanente. La roue est maintenant libre et peut être retirée.